



Modell 10

Liko Original Hebegurt, Modell 10, 11

Liko Original Hebegurt eignet sich für Pflegebedürftige mit einer eingeschränkten Beweglichkeit der Arme und sorgt für eine bequeme Sitzposition. Liko Original Hebegurt ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Das linke Bild zeigt die Ausführung mit verstärktem Rücken.



Modell 300/310

Liko Comfort Hebegurt Plus, Modell 300, 310

Liko Comfort Hebegurt Plus ist eine Weiterentwicklung des Comfort Hebegurts (Modell 30, 31) mit höherem Komfort und optimierter Passform. Liko Comfort Hebegurt Plus ermöglicht eine aufrechte Sitzposition und Unterstützung des ganzen Rückens. Liko Comfort Hebegurt Plus wird im Liegen an- und abgelegt. Nach dem Transfer kann der Hebegurt im Rollstuhl unter dem Pflegebedürftigen verbleiben. Das Modell 310, Liko Comfort Hygiene Hebegurt Plus, hat einen Hygieneausschnitt.

Grundmodelle für leichte und sichere Transfers



Modell 10

ausreichender Sitzstabilität. Er ist einfach und flexi-
 on. Durch das nur halbhohe Rückenteil ist die freie
 ert ist in verschiedenen Größen und Ausführungen



Modell 00

Liko Universal Hebegurt, Modell 00, 02

Liko Universal Hebegurt ist für die meisten
 Pflegebedürftigen geeignet. Dieses Grund-
 modell ist ein optimales Hilfsmittel auch für
 ältere Pflegebedürftige mit eingeschränkter
 Mobilität. Liko Universal Hebegurt ermöglicht
 eine aufrechte Sitzposition mit Unterstützung
 des ganzen Rückens.

Mit dem kurzhängenden Modell 02 wird eine
 größere Hubhöhe erreicht.



Modell 20/26

Liko Original Hebegurt mit Hohem Rücken und Soft Original Hebegurt mit Hohem Rücken, Modell 20, 26

Liko Original Hebegurt und Soft Original Hebegurt
 mit Hohem Rücken ermöglichen eine zurückge-
 lehnte Sitzposition mit Kopfunterstützung. Daher
 eignen sie sich besonders für Personen mit geringer
 Rumpfstabilität und eingeschränkter Kopfkontrolle.
 Soft Original Hebegurt mit Hohem Rücken bietet
 eine ausgereifte Passform und viel Komfort mit
 bequemer Kopfunterstützung in der Sitzposition.
 Liko Original Hebegurt und Soft Original Hebegurt
 eignen sich hervorragend für Transfers vom bzw.
 auf den Fußboden.



Modell 350/360

Liko Comfort Hebegurt Plus mit Hohem Rücken, Modell 350, 360

Liko Comfort Hebegurt Plus mit Hohem Rücken
 ist eine Weiterentwicklung des Comfort Hebe-
 gurts (Modell 35, 36) mit höherem Komfort und
 optimierter Passform. Liko Comfort Hebegurt
 Plus mit Hohem Rücken ermöglicht eine etwas
 zurückgelehnte Sitzposition und Unterstützung
 des ganzen Rückens. Zudem ist der Hebegurt mit
 einer weichen Kopfstütze versehen. Liko Comfort
 Hebegurt Plus mit Hohem Rücken wird im Liegen
 an- und abgelegt. Nach dem Transfer kann der
 Hebegurt im Rollstuhl unter dem Pflegebedürftigen
 verbleiben. Das Modell 360, Liko Comfort Hygiene
 Hebegurt Plus mit Hohem Rücken, hat einen
 Hygieneausschnitt.



Modell 00

Liko Universal Hebegurt eignet sich auch
 für Transfers mit übereinander gelegten
 Beinstützen unter beiden Beinen, z. B. bei
 Frauen, die einen Rock tragen.



Modell 22

Liko Silhouette Hebegurt, Modell 22

Liko Silhouette Hebegurt ermöglicht eine
 zurückgelehnte Sitzposition mit bequemer
 Unterstützung des Kopfes. Dieser Hebegurt
 wurde speziell für das Umsetzen in enge Roll-
 stühle und Sitzschalen entwickelt.
 Der Hebegurt kann im Rollstuhl verbleiben.
 Liko Silhouette Hebegurt ist aus dünnem,
 weichem Material und ohne Griffe und
 Verstärkungen.

Für den Toilettengang

Modelle für das An- und Entkleiden während des Transfers



Modell 41



Modell 45/46

Liko Hygiene Hebegurt, Modell 40, 41, 45, 46

Liko Hygiene Hebegurt ist ein einfacher und leicht anzuwendender Hebegurt, der durch seine große Aussparung das An- und Entkleiden beim Toilettengang erleichtert. Er eignet sich für Personen mit ausreichender Körperstabilität.

Liko Hygiene Hebegurt, Modell 41, ist mit einem Gürtel versehen und bietet eine optimierte Passform.

Der Sicherheitsgürtel am Modell 45 hebt um den ganzen Rumpf und verleiht somit größere Sicherheit.

Außer dem Sicherheitsgürtel bietet Modell 46 zusätzlich eine hohe Rückenstütze.



Modell 50



Modell 55

Liko HygieneWeste, Modell 50, 55

Liko HygieneWeste ist ein einzigartiger patentierter Hebegurt, der speziell für Menschen mit schwachem Muskeltonus für den sicheren Transfer beim Toilettengang entwickelt wurde.

Er ermöglicht eine aufrechte Sitzposition mit guter Körperunterstützung und lässt gleichzeitig einen Großteil des Unterkörpers zum An- und Entkleiden frei. Das Modell 55 ist mit einer Kopfstütze versehen.

Solo personenspezifische Hebegurte



Modell 25

Solo personenspezifischer Hebegurt

Bei unserer Modellserie personenspezifischer Hebegurte für den zeitlich begrenzten Gebrauch entfällt das Waschen und Kreuzkontaminationen werden vermieden. Solo ist besonders vorteilhaft, wenn das Reinigen traditioneller Textilhebegurte zwischen den Transfers verschiedener Pflegebedürftiger nicht gewährleistet werden kann. Solo mit Hohem Rücken eignet sich für die meisten Pflegebedürftigen und für übliche Hebe- und Transferaktionen.

Beinamputierte



Modell 70

Liko Hebegurt für Amputierte, Modell 70, 75

Der spezielle Zuschnitt des Liko Hebegurts für Amputierte mit der zusätzlichen Beinstützenführung verhindert das Auseinanderrutschen der Beinstützen. Liko Hebegurt für Amputierte empfehlen wir für Pflegebedürftige mit beidseitig hohen Beinamputationen oder mit Bedürfnis nach größerer Sicherheit.

Liko Hebegurt für Amputierte ist mit zwei Rückenhöhen erhältlich: Modell 70 (Bild) stützt bis über die Schulter. Modell 75 stützt auch den Kopf.

Für Halt und Sicherheit im Stehen



Modell 60, 64



Modell 60



Modell 64



Modell 92



Modell 920

Liko MasterWeste, Modell 60, 64

Liko MasterWeste erleichtert das Aufrichten von Pflegebedürftigen, die die Beine belasten können. Auch bei Steh-, Geh- und Gleichgewichtsübungen ist Liko MasterWeste ein gutes Hilfsmittel. Hierbei werden die Helfer entlastet und die Verletzungs- und Belastungsgefahr reduziert. Bei alltäglichen Verrichtungen bleibt der Unterkörper zum An- und Entkleiden frei. Dank des Vorderverschlusses bei Liko MasterWeste, Modell 64, kann der Pflegebedürftige die Weste selbst an- und ablegen. Beinhaltegurte sind als Zubehör erhältlich.

Liko Lifthose, Modell 92

Liko Lifthose Ultra, Modell 920

Mit Liko Lifthose können Pflegebedürftige Gehübungen unter sicheren und kontrollierten Bedingungen durchführen. Die Sicherheit verleiht Mut, sich etwas mehr zuzutrauen. Liko Lifthose ermöglicht eine große Bewegungsfreiheit bei Entlastung des Körpergewichts. Liko Lifthose hebt sicher und erlaubt die Bewegung des Pflegebedürftigen ohne Gefahr, hinzufallen.

Bei Druckempfindlichkeit



Modell 10

Für besonders druckempfindliche Menschen sind die meisten Modelle in einer mit Kunstfell gepolsterten Ausführung erhältlich. Das Polster hat eine verstärkte Einlage, die bei Bedarf entfernt werden kann.

Polyesternetz – die luftdurchlässige Alternative



Modell 00

Soll der Hebegurt nach dem Transfer unter dem Pflegebedürftigen verbleiben, ist Polyesternetz das geeignete Material. Die meisten Modelle gibt es in dieser luftdurchlässigen und stabilen Alternativausführung. Hebegurte aus Polyesternetz können auch beim Baden und Duschen verwendet werden.

Baden und Duschen



Modell 00

Für den Transfer in die Badewanne oder Dusche gibt es mehrere Modelle in formstabilem Badenetz, das kein Wasser aufnimmt und sich daher auch bei Nässe angenehm auf der Haut anfühlt.

Sortimentübersicht, Hebegurte für Erwachsene

Artikel-Nr.		Universal Hebegurte kurzärmelnd	Universal Hebegurte	Ultra Hebegurte	Original Hebegurte	Original Hebegurte	Silhouette Hebegurte HR	Soft Original Hebegurte	Soft Original Hebegurte	Comfort Hebegurte HR	Comfort Hebegurte HR	Comfort Hygiene Hebegurte Plus	Comfort Hygiene Hebegurte Plus	Hygiene Hebegurte Plus HR	Hygiene Hebegurte Plus HR	Hygiene Hebegurte mit Gürtel	Hygiene Hebegurte mit Sicherheitsgürtel u. Rückensstütze	Hygiene Hebegurte mit Sicherheitsgürtel	Hygiene Hebegurte mit Sicherheitsgürtel	Hygiene Hebegurte	Hygiene Hebegurte	Musterweste mit Vorderverschluss	Musterweste HR	Musterweste	Musterweste mit Vorderverschluss	Hebegurte für Amputierte HR	Hebegurte für Amputierte HR	Hebegurte für Amputierte HR	Hebegurte für Amputierte HR	Lifhose Ultra	Lifhose	920							
35XX--	Modellbezeichnung	00	02	06	10	11	20	21	22	25	26	300	310	350	360	40	41	45	46	50	55	60	64	67	70	75	92	920											
Größen	35---4 Small	•														•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
	35---5 Medium Slim	•				•		•		•	•																												
	35---5 Medium	•	•		•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	35---6 Large	•	•		•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•					
	35---7 XLarge	•			•		•			•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•							•	•	•	•					
	35---8 XXLarge						•				•										•	•	•	•										•					
	35---9 XXXLarge																				•														•				
	35---14 Kurz				•																																		
	35---15 Mittel				•																																		
35---16 Lang				•																																			
Mit Aussteifung	35--11 Nylon/Polyester	•	•	•	•	•	•	•			•								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	35--21 Baumwolle	•			•	•	•	•				•		•																									
	35--31 PolyesterNetz	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•																							
	35--41 Badenetz	•	•		•		•	•				•		•		•																							
	35--12 Polster, Polyester	•	•		•	•	•	•									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	35--13 Polyester, Cord				•												•	•	•	•	•	•																	
	35--22 Polster, Baumwolle	•			•		•	•									•																						
	35--32 Polster, PolyesterNetz	•	•		•	•	•	•	•	•																											•	•	
Ohne Aussteifung	35--10 Nylon/Polyester	•			•	•	•	•																															
	35--20 Baumwolle	•			•		•										•																						
	35--30 PolyesterNetz	•	•		•	•	•	•	•																														
	35--40 Badenetz	•	•		•	•	•	•	•								•																						
	35--60 PolyesterNetz, dünn	•			•		•	•	•																														
WC-geeignet	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																													
Integrierte Kopfstütze							•	•	•	•	•										•																		
Personenspezifischer Einweghebegurte												•																											

- = Lagerware
- = Bestellware (Lieferzeit 1-4 Wochen)
- HR = mit Hohem Rücken

Einige weniger gebräuchliche Artikel müssen bestellt werden.

Hebezubehör



RepoTuch Original

Dieses Positionierungstuch ist ein ausgezeichnetes Hilfsmittel beim Verlagern des Pflegebedürftigen zum Kopfende des Bettes oder in die Seitenlage. Das RepoTuch wird unter dem Pflegebedürftigen platziert und kann mit einem normalen Bettlaken kombiniert werden oder ein solches ersetzen.



Kreuzbügel

Liko Kreuzbügel ermöglicht eine weiter zurückgelehnte Sitzposition als ein Zweipunktbügel. Dies ist vorteilhaft z. B. nach Operationen am Hüftgelenk. Liko Kreuzbügel eignet sich für viele Hebegurte im Liko-Sortiment und ist in zwei Modellvarianten erhältlich.



Polster

Polster sind Hüllen, die für sämtliche Liko Hebegurte zusätzlich erhältlich sind. Die eine Seite ist mit Kunstfell versehen, die andere besteht aus dem Material des jeweiligen Hebegurts. Geben Sie bitte bei der Bestellung an, für welchen Hebegurt (Modell, Größe und Material) das Polster vorgesehen ist.

Verlängerungsschlaufen


Liko Verlängerungsschlaufen ermöglichen eine schnelle und einfache Anpassung des Hebezubehörs an unterschiedliche Bedürfnisse. Sie sind in zwei Längen erhältlich, die eine gewöhnliche Hebeschlaufe um 12 bzw. 22 cm verlängern.



Liko Waage


Digitalwaage zur Verwendung an sämtlichen Patientenliftern von Liko. Die leicht zu handhabende und gut ablesbare Waage wird über dem Hebebügel angebracht. Liko Waage gibt es in zwei Ausführungen zum Wiegen von Pflegebedürftigen bis zu 350 kg.

Universalhebebügel

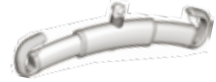

Universalhebebügel 350

Ein Modell insbesondere für den Transfer von Kindern.

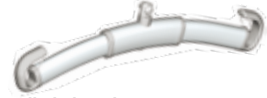


Universalhebebügel 450

Unser Allround-Modell eignet sich für die meisten Transferaufgaben.



Universalhebebügel 670 Twin

Ein Hebebügel für kräftige Pflegebedürftige und für größere Breite im Schulterbereich.

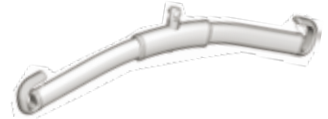

Universalhebebügel 600

Dieser Hebebügel wird am besten mit einem Liko Comfort Hebegurt kombiniert. Er passt auch, wenn Sie die geteilten Beinstützen unter beiden Beinen übereinander legen möchten.



Universal Seitenbügel

Liko Seitenbügel werden für eine halbsitzende Körperhaltung zum Aufhängen des Hebegurts an vier Punkten eingesetzt. Wird normal mit Universalhebebügel 450 oder 600 kombiniert.

Weiteres Zubehör finden Sie im Internet unter www.liko.com



Hill-Rom

Optimierte Ergebnisse für Patienten und Pflegende.™

France +33 (0)2 97 50 92 12
 United Kingdom +44 (0)1530 411000
 Deutschland +49 (0)211 16450-0
 Nederland +31 (0)347 32 35 32
 Italia + 39 (0)2 950541
 Suisse/Schweiz +41 (0)21 706 21 30
 (deutschsprachig) +41 (0)21 706 21 38
 Österreich +43 (0)2243 28550

Ireland +353 (0)1 413 6005
 Iberia +34 (0)93 6856000
 Portugal +351 210 991 891
 Nordic Countries +46 (0)920 47 47 11

Export Contact your local Hill-Rom distributor or contact your Area Manager via website or call +1 812 934 8173

www.hill-rom.com
www.liko.com

Hill-Rom behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen des Designs, der Spezifikationen und Modelle vorzunehmen. Die einzige von Hill-Rom übernommene Gewährleistung ist die ausdrückliche schriftliche Gewährleistung, die sich auf den Verkauf oder Verleih seiner Produkte erstreckt.
 © 2010 Hill-Rom SARL, ALLE RECHTE VORBEHALTEN

Hebezubehör.



Hebegurte für Erwachsene



Liko Hebezubehör

Der erste Liko Hebegurt war ganz aus Textilgewebe.

Er löste damals eine kleine Revolution aus! Heute bietet Liko mit über 300 Hebegurten die weltweit größte Auswahl an Hebegurten und Hebezubehör. In Kombination mit unseren vielen Varianten an Hebebügeln mit unterschiedlichen Breiten und Funktionen bieten die Hebegurte eine Lösung für jede Transferaufgabe.

Über 30 Jahre lang haben wir in enger Zusammenarbeit mit Pflegebedürftigen und Pflegepersonal Hebezubehör mit guter Funktionalität und leichter Handhabung entwickelt.

Diese Entwicklungsarbeit wird bei Liko ständig weitergeführt und das Zubehör an veränderte Bedürfnisse und neue Erkenntnisse angepasst.

Verschiedene Modelle und Ausführungen

Um unterschiedlichen Transferbedürfnissen gerecht zu werden, haben alle Modelle einzigartige Eigenschaften. Manche Ausführungen bezeichnen wir als Grundmodelle, weil sie gut universell einsetzbar sind. Andere Modelle sind für spezielle Anwendungsbereiche konzipiert. Die meisten Hebegurte von Liko sind auch mit Verstärkungen der Beinstützen und/oder des Rückenteils erhältlich.

Hebegurte für Kinder

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Wir haben ein umfangreiches Sortiment an Hebegurten explizit für Kinder entwickelt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Broschüre mit Hebezubehör für Kinder oder besuchen Sie unsere Website www.liko.com.

Individuelle Anpassung

Das jeweilige Hebezubehör sollte nach den individuellen Anforderungen und Bedürfnissen ausgewählt und angepasst werden. Damit wird ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort für Pflegebedürftige und Helfer gewährleistet.

Größen

Die Wahl der richtigen Größe ist äußerst wichtig für Sicherheit, Funktion und Komfort.

Jedes Modell ist in verschiedenen Größen erhältlich, die Sie der Sortimentübersicht in dieser Broschüre entnehmen können.

Gebrauchsanweisung

Jedem Hebegurt liegt eine ausführliche Gebrauchsanweisung bei, die sorgfältig gelesen und befolgt werden sollte. In der Gebrauchsanweisung finden Sie auch Hilfestellungen zur Auswahl des passenden Hebebügels für den jeweiligen Hebegurt.

Kennzeichnung

Ein Etikett an jedem Hebegurt zeigt Modell, Größe und Ausführung an. Hier finden Sie auch die Waschanleitung und die Tragfähigkeit des Hebegurts.

Kontrolle

Hebegurte sind Gebrauchsgegenstände mit begrenzter Lebensdauer. Durch den täglichen Gebrauch und vor allem häufiges Waschen treten Verschleißerscheinungen an Stoff und Nähten des Hebegurts auf.

Daher sollte jedes Hebezubehör regelmäßig überprüft werden. Verwenden Sie kein defektes Hebezubehör! Liko Hebegurte sind von einem akkreditierten Prüfinstitut getestet und erfüllen sämtliche Anforderungen der EU-Richtlinie über Medizinprodukte (MPG) der Klasse I sowie sämtliche Anforderungen der harmonisierten Norm EN ISO 10535.